

Garancia

A vásárlástól számított 12 hónap a készülékre, és 3 hónap a tartozékokra teljes körű garancia vonatkozik. Meghibásodott készülék esetén eredeti csomagolásban kérjük juttassa vissza a készüléket cégünkhöz a vásárlás dátumát igazoló irattal. (számla/blokk/stb.) Binszki Attila ev "BinOla" kereskedelmi és kölcsönző vállalkozás Bácsalmás, Dózsa Gy. u. 53 tel./fax 79/341-442

A garancia nem vonatkozik olyan károkra, illetve az ezekből keletkező egyéb károkért, amelyek helytelen, szakszerűtlen kezelésre, rendeltetésellenes használatra, ill. jogosulatlan személyek általi használatra vezethetők vissza. Az ilyen jellegű károk javíttatása csak térítés ellenében lehetséges.

Specifikációk:

Súly: 1,5 kg, biztosíték: 3.15AL 250 VP

Jelek:



II. érintésvédelmi osztály.
Földelni Tilos!

B típus



A megsemmisített készüléket az arra alkalmas szelektív hulladékgyűjtőbe helyezze el

Feszültség	Frekvencia	Névleges áram	Megjegyzés
100 V -	50/60 Hz	0,9/0,65 A	
110 V -	50/60 Hz	0,5/0,40 A	
120 V	60 Hz	0,63 A	
220 V	50/60 Hz	0,12/0,33 A	
230 V -	50/60 Hz	0,25/0,20 A	X
240 V	50/60 Hz	0,24/0,18 A	

Figyelmeztetések:

Használat előtt alaposan olvassa végig:

Az elektromos eszköz használata alatt az általános biztonsági óvintézkedéseket kell betartani.

VESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében

1. Használat után mindig húzza ki az elektromos készüléket
2. Ne használja fürdés közben!
3. Ha a készülék vízbe esett, ne érintse meg azonnal, előbb áramtalanítsa azt!

FIGYELMEZTETÉS: Az égés, áramütés, tűz, vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében

1. A készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor az áram alatt van
2. Mérsékelt figyelem szükséges, ha az eszközt csecsemő vagy gyermek mellett használják
3. Csak az Unimom készülékhez járó adapterrel használandó
4. Csak az Unimom tartozékokkal ajánlott a mellszívót használni
5. A készüléket a használati útmutatóban rendeltetésszerűen leírtaknak megfelelően szabad használni
6. Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha a csatlakozó, vagy a kábel sérült, ha nem megfelelően működik, ha már leesett, megsérült, vízbe esett, vagy bármely alkatrésze, tartozéka törött, vagy hiányzik
7. A készüléket tartsuk távol a forró felületektől
8. Soha ne használjuk alvás közben
9. Ha a készülék használaton kívül van, mindig húzza ki a tápkábel
10. Ne szerelje szét, vagy alakítsa át a készüléket
11. A készüléket nem ajánlott használni aerosol spray használata mellett, illetve ahol az oxigén ellátás nem megfelelő

Fejési útmutató

1. Helyezze kényelembe magát
2. Gyengéden masszírozza a mellét, vagy alkalmazzon meleg borogatás a mellbimbó felett mielőtt használatba venné a készüléket
3. Egy-egy mellből kb. 10-15 percig fejeje az anyatejet. Sokkal hatásosabb, ha gyakran fejjük az anyatejet, mintha sokáig fejnénk. (célszerű: 2-3 óránként, 8x/nap)

Megjegyzés: a baba szoptatása, és az anyatej egyidejű fejeése nem zárja ki egymást!

Figyelem: Amennyiben szívproblémákkal küszködik, konzultáljon orvosával a készülék használata előtt!

UNI **mom** Forte



Elektromos mellszívó használati utasítás

Gondoskodj a babádról Unimom-mal

- kétoldalú szívás
- ritmikus szívás
- kényelmes
- BPA mentes műanyag flakon
- extra hosszú motor élettartam



Rendeltetésszerű használat

1. Könnyít a vérbőségen
2. Anyatej-fejés távol a babától

Áttekintés:



1. Fogó
2. Vákuum erősség szabályzó
3. Csatlakozó
4. Biztosítéktartó
5. Tápkábel
6. Kapcsoló

Hogyan használjuk:

1. Állítsuk össze a készüléket
2. Kezdjük a gyenge vákuummal
3. A mellbimbóját illessze a mellszívó tölcseré középebe
4. kapcsolja be a készüléket
5. Állítsa be a megfelelő vákuum erősséget a szabályzóval
6. Használat után kapcsolja ki a készüléket

Megjegyzés: tisztítsa meg a kezeit, és fertőtlenítse a felszerelést forrásban lévő vízben (2-3 percig - kivéve a szilikon csövet) mielőtt használja a mellszívót

Figyelem: Ne csavarja be a csövet. Ne töltsen túl a az üveget 40Z. szinten túl

Tisztítás és sterilizálás

1. Távolítsa el a szelep fejét és a membránt a szívópajzsról
2. Tisztítsa és sterilizálja az eszközt forrásban lévő vízben 2-3 percig
3. Vegye le a légsővet, és óvatosan tisztítsa át mosószerrel
4. Legalább egy héten egyszer végezze el a tisztítást , de amennyiben használta a készüléket, utána azonnal tisztítsa azt meg

Megjegyzés: a páralecsapódás kiküszöbölése, ill. a tej a légsőbe kerülésének elkerülése érdekében, a tisztítás után hagyjuk száradni a készüléket. A készülék fő részét nedves törölkendővel tisztítsuk meg. **Figyelem:** Soha ne tegyük vízbe a készülék egészét. A készüléket ne tegyük mikrohullámú sütőbe.

Tartozékok



- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| A. Szívó pajzs 2 db | B. Műanyag tejtartó flakon 2 db |
| C. Üveg borítás 2db | D. Hálózati csatlakozó 1 db |
| E. Fő test 1 db | F. flakon tartó talp 2 db |
| G. Légső 2 db | H. sapka 2 db |
| I. Lemez 2 db | J. Cumi 2 db |
| K. Szívó csomk 2db | L. Membrán 2 db |
| M. Kettős elágazó 1 db | |

Felszerelés: A+B+C+...+L

Az anyatej tárolásának módja:

A legjobb az, amikor közvetlenül a fejés után tudjuk etetni a babát, azonban ha ez nem kivitelezhető, fordítsunk megfelelő figyelmet az anyatej tárolására.

Szoba hőmérséklet	3 órán át	Ne tegyük ki a tejet meleg időjárásnak
Hűtő	1 napig	
Fagyasztó	3 hónapig	

Megjegyzés: Fagyasztás előtt 2 órán át hűtsük hűtőben az anyatejet

Figyelem: a fagyasztott anyatejet címkézzük fel, és lássuk el dátummal! Ne keverjük a friss anyatejet fagyasztott anyatejjel!

Az anyatej olvasztása

1. Használat előtt több órával vegyük ki a mélyhűtőből az anyatejet
2. Etetés előtt tegyük meleg folyóvíz alá az üveget, amíg a tej szobahőmérsékletű nem lesz
3. Rázzuk fel jól az üveget

Figyelem: ne olvasszuk a tejet mikrohullámú sütőben, mert az károsan befolyásolja az anyatej összetevőit. Az anyatejet nem szabad visszafagyasztani.

A készülék tárolása:

Minden használat után tisztítsuk meg, és töröljük át egy nedves kendővel a fő készüléket és annak alkatrészeit.

Figyelem: ha a készülék húzamosabb ideig nem használjuk, tároljuk hűvös helyen.

Üzembe helyezés

1. Egyoldalú szívás



1. Illesse a membránt (L) a szívó csomkhoz (K)
2. A szívó csomköt nyomja a szívópajzs (A) tetejéhez
3. Az üveget (B) csavarja a szívópajzshoz



4. Az üveget helyezze el az üvegtartóba (F)
5. Csatlakoztassa a légső egyik végét (G) a szívópajzshoz
6. A másik végét csatlakoztassa az egység csatlakozóhoz (D)

2. Kétoldalú szívás

5. pontig megegyezik az egyoldalú szívás üzembe helyezésével



6. csatlakoztassa a dupla csatlakoztatót (M) az egység csatlakozóhoz (D)
7. a légső másik végét csatlakoztassa a dupla csatlakozóhoz

Hibajelzések:

Hibák	Lehetséges okok	Ellenőriztük...	Megoldás
Kicseszívás	Biztosíték	Ellenőriztük, hogy a biztosíték csatlakoztatva lett-e.	Cserélje ki a megfelelő biztosítékot, és kövesse a specifikációt
	Kapcsoló	Ellenőriztük, hogy a készülék be van-e kapcsolva	Ha a remek nem működik, működjön bekapcsolva van, ellenőrizze a kapcsolót a csatlakozóhoz
	Táplálék	Ellenőriztük, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva	Dugjuk be a kábelcsatlakozót
	Tegység	Ellenőriztük, hogy a légső megfelelően csatlakoztatva van-e a fő légsővel	Nézze meg, hogyan kell csatlakoztatni, és csatlakoztassa a légsőt a megfelelő módon
	Membrán	Ellenőriztük, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a pajzsot	Szerelje szét, majd újra össze az alkatrészeket
Alacsony szívás	Fontos összeszerelés	Ellenőriztük a készüléket	Szedjük szét, majd rakjuk újra össze a készüléket
	Membrán	Ellenőriztük, hogy van-e hely a szelep és a membrán között	Váltsunk egy új pajzsot
	Membrán	Ellenőriztük, hogy van-e hely a szelep és a membrán között	Távolítsuk el az idegen anyagokat
Fájdalom	Túl erős szívás	Ellenőriztük a beállított szívás erősséget	Állítsuk a legkisebb szívási erősségre. Konzultáljon a védőnővel, vagy orvosával

Figyelem: amennyiben a készülék abnormális zajt produkál, vagy ha az anyatej kifolyik a fő tartóból, kérjük vegye fel a kapcsolatot a céggel. Amennyiben az anyatej csak a légsőig folyik túl, vegye azt le a készülékről, és tisztítsa ki.